

72035 - COUSSIN GONFLABLE POUR LOMBAIRES

Mode d'emploi:

1. Sortir et dérouler la valve située dans la pochette inférieure. (voir image A)
2. Pour ouvrir la valve, insérer vos doigts ou une règle puis gonfler.
3. Lorsque le coussin est complètement gonflé, rabattre la valve dans la pochette inférieure en s'assurant que la bande agrippante de la valve soit bien attachée à celle de la pochette inférieure.
4. Placer le coussin sur le dossier de votre chaise ou fauteuil pour un soutien supplémentaire

Pour dégonfler: sortir la valve de la pochette inférieure et la dérouler. Rouler le coussin pour évacuer l'air. (voir image B)

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide

